

Kurzanleitung zum Corona-Selbsttest „SARS-CoV-Rapid-Antigen Test“ von ROCHE

1. Hole dir folgende Materialien vom „Testtisch“ und nimm sie mit an deinen Platz:

- Teststäbchen




- Flüssigkeitsampulle



- Pipettieraufsatz



- Testgerät

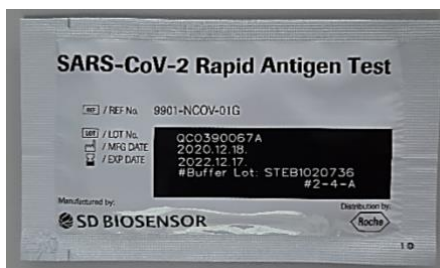

2. Nimm das Testgerät aus der Verpackung.

3. Nimm das Teststäbchen aus der Packung und führe den Tupfer mit der weichen, textilen Spitze vorsichtig in ein Nasenloch ein. Drehe den Tupfer entlang der Schleimhaut im Nasenloch ca. 3-4 Mal. Wiederhole den Vorgang im anderen Nasenloch.

VORSICHT: Das kann sich etwas unangenehm anfühlen. Führe den Tupfer nicht tiefer ein, wenn du einen starken Widerstand oder Schmerzen spürst!


4. Öffne die Flüssigkeitsampulle und stecke das Teststäbchen mit der weichen, textilen Spitze in die Flüssigkeit der Ampulle. Drehe den Tupfer nun 5-10 Mal in der Flüssigkeit.

5. Drücke die elastische Ampulle nun leicht zusammen, sodass beim Herausnehmen des Teststäbchens so viel wie möglich der Probe vom Teststäbchen abgestreift wird. Das Teststäbchen legst du auf oder in die alte Verpackung des Stäbchens, NICHT AUF DEN TISCH!

6. Setze den Pipettieraufsatz auf die Flüssigkeitsampulle.

7. Gib nun vorsichtig genau 3 Tropfen der Probelösung auf die ovale Probenvertiefung.

8. Das Ergebnis kann nach 15 Minuten abgelesen werden:

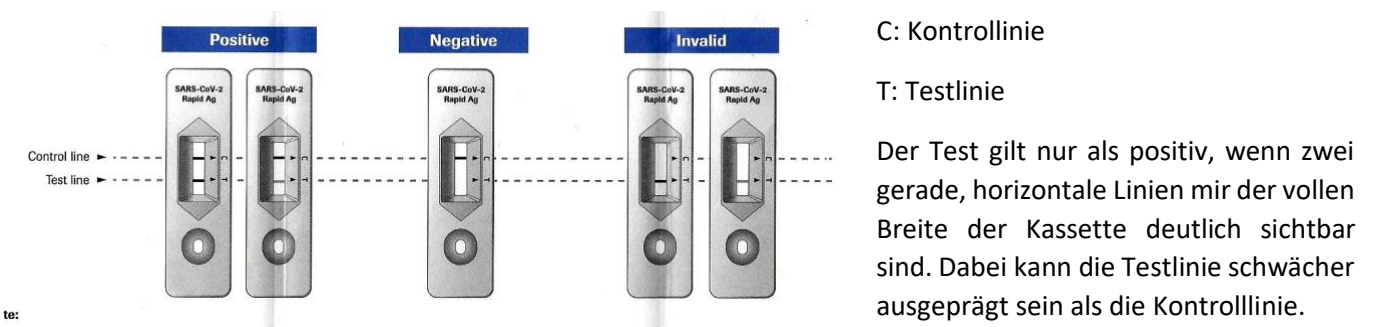

9. Entsorge alles in dem dafür vorgesehenen Müllbeutel und wasche dir gründlich die Hände.